

めがね装着用 Cheapfaceshield (試作品) 取扱説明書


三菱化学株式会社 ノバクリアー®使用

ご使用方法

<用意する物> めがね もしくは めがねフレーム (必須)

※フレームは安価な老眼鏡のレンズを外していただくことで用可能です。

ゼムクリップなど
ホッチキス

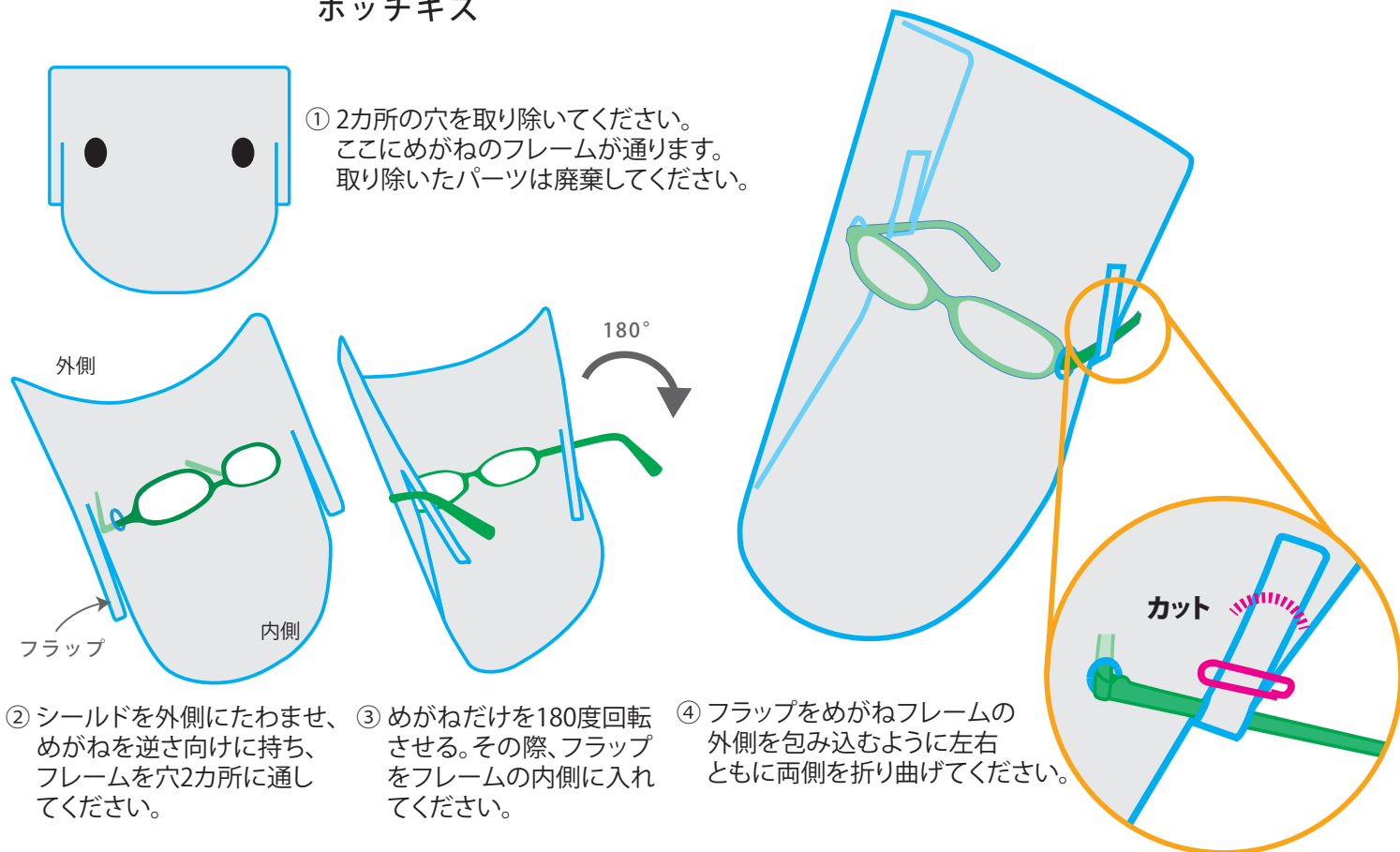

医療用フェイスガードが入手しづらい状況での代替利用を想定しています。
使い捨てを想定していますので使用後は安全に廃棄してください。
廃棄方法は各市町村の指示に従ってください。

クリップなどで仮止めし、位置合わせ後は必ずしてホッチキスなどで固定してください。

これで完成です。

緊急時に繰り返し使用する場合は水洗い後に消毒していただき、
表面が曇るようでしたらレンズ拭きのような柔らかい素材でやさしく拭いてください。
表面に傷が入りやすいのでご注意ください。
割れ、欠け等の破損が見られましたら新しい製品とお取り替えください。
薬剤すべてに耐性があるわけではありません。目立たないところで試してから消毒してください。

長すぎる場合は破線のようにカットしてください。

重量が軽いシールドですが、装着後めがねがズれる場合はめがね用のストラップなどをご利用ください。

シート材料は三菱化学株式会社 ノバクリアー®を使用しています。
使用制限が【油性・水性 (pH5超) 酸性 (pH5以下)】食品、酒類用全てに適合する耐熱温度が100℃のシートです。
MSDS 他、関係書類は京都府医療資材コントロールセンターに提出しております。

緊急時につき傷防止作業ができておりませんので若干の擦り傷は何卒ご容赦くださいますようお願い申し上げます。
大変申し訳ございませんがご利用されたことにより生じたいかなる損害についても一切責任を負えません。

印刷と紙製品・各種包装資材
製造者 株式会社 藤澤 萬華堂
☎ 600-8042
京都市下京区麩屋町通綾小路下ル俵屋町302
◇ TEL075-341-0108 ◇ FAX 075-351-5469
cheapfaceshield@fujisawamankadou.co.jp



<家庭用品品質表示>
原材料樹脂 PET 樹脂
耐熱温度 100℃
<取り扱いの注意>
火のそばに置かないでください。

この商品に対するお問い合わせはメールでお願いします。

Made in Kyoto

2020.05.01